

# BORT Spezial-Waschmittel

für medizinische Kompressionsgestricke



- ⊕ Speziell für medizinische Kompressionsgestricke
- ⊕ Höchste Reinheit bei der Handwäsche
- ⊕ Einfache Anwendung für den täglichen Gebrauch



**REF 599 070**  
PZN: 13059911  
BORT Spezial-Waschmittel  
Inhalt: 250 ml


**REF 599 076**  
PZN 13059928  
BORT Spezial-Waschmittel – 6er Pack  
Inhalt: 6 × 250 ml

## Eigenschaften:

BORT Spezial-Waschmittel ist ein pH-neutrales, hochwirksames Handwaschmittel-Konzentrat für alle gummielastischen Gestricke. Es entfaltet bereits bei 30°C seine volle Waschkraft, ist desodorierend und biologisch abbaubar. BORT Spezial-Waschmittel trocknet die elastischen Teile des Gestricks nicht aus und sorgt für die bestmögliche Pflege Ihrer Hilfsmittel.


## Anwendung:

Eine viertel Verschlusskappe (5 ml) in ca. 2–3 l handwarmem Wasser auflösen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser ausspülen. Inhalt reicht für 50 Anwendungen.


 5 ml auf 2-3 l Wasser

## Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffangabe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergentienverordnung)  
5–15 % anionische Tenside, unter 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe, Linalool. Konservierungsmittel (2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol)  
Informationen über INCI-Bezeichnungen unter <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>  
Stand: 23.06.2016

 Hersteller: Ultrana GmbH  
Mackstr. 112 | D-88345 Bad Saulgau  
[www.ultrana.de](http://www.ultrana.de) | +49 (0) 7581 2007298

 Vertrieb durch: BORT GmbH  
Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt  
[www.bort.com](http://www.bort.com) Telefon: | +49 (0) 7151 99200-0

 Vertrieb in der Schweiz durch: Orthosan AG  
Freiburgstrasse 634 | CH-3172 Niederwangen b. Bern  
[www.orthosan.ch](http://www.orthosan.ch)

**BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®**

BORT GmbH Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | Telefon (07151) 99200-0  
Telefax (07151) 99200-50 | [www.bort.com](http://www.bort.com) | [medical@bort.com](mailto:medical@bort.com)